

ITREMOR MOUSE



FUNKTIONER

- Software som filtrerer rystelser væk
- Egnede til computer mus
- Løsning til ufrivillige tryk på venstre og højre klik
- Kan nemt justeres til rystelser på mange niveauer
- Software boks sættes til mellem mus og enhed

MÅLGRUPPEN

Brugere som har udfordringer med brug af en computer mus på grund af tremor

HVEM ER TKS

"Med velfærdsteknologi, som omdrejningspunkt, er vores formål at skabe større frihed i hverdagen for borgere ramt af en invaliderende sygdom. Dette med henblik på at skabe en væsentlig forøgelse af deres livskvalitet."

Søren Mørch, CEO



HVAD ER ITREMOR MOUSE?

Itremor Mouse består af et modul, som indeholder software der bortfiltrerer rystelser med musemarkøren på computeren. Derved skabes der mulighed for at tremor-ramte igen kan bruge deres computermus uden at blive forstyrret af rystelserne.

Hjælpemidlet er en boks som sættes imellem computer og computermusen via usb. Alt software er i boksen og derfor skal der kun installeres en USB driver på computeren. Boksen har to funktioner: Drejeknappen justerer i hvor høj grad softwaren filtrerer rystelser.

Den anden knap slår højre- og venstreklik til og fra. Denne funktion er til dem som ukontrolleret kommer til at trykke på musens højre- og venstreklik.



FORDELE VED ITREMOR MOUSE

Produktet gør en markant forskel for brugeren, da det i væsentlig grad letter den daglige tilværelse både i hjemmet, men også på arbejdspladsen. Brugere som helt eller delvist er blevet forhindret i at bruge en computermus, kan ved hjælp af Itremor Mouse, igen tage kontrol over computermusen og dermed computeren. Det vil sige at nogle brugere vil bruge markant mindre tid på at fumle med markøren. Andre som måske har opgivet, vil være i stand til igen at finde glæden ved at bruge en computermus.

- Skaber mulighed for at arbejde mere effektivt med en computer på arbejdspladsen og i hjemmet
- Skaber mulighed for igen at arbejde med en computer, hvis brugeren har været forhindret af tremor
- Hjælpe midlet er klar til brug - skal bare sættes til mellem mus og computer
- Passer til de fleste mus - ellers kan man i dialog med TKS finde en løsning

OPSÆTNING OG TILPASNING

ITremor boksen sættes nemt til ind imellem mus og computer via USB.

For at kalibrere musen til brugerens rystelser, holder brugeren sin hånd på musen og lader den ryste naturligt. Man justerer derefter på filtrere knappen, indtil markøren på skærmen står stille. Boksen er nu justeret til brugerens aktuelle behov og brugeren kan navigere markøren uden større forstyrrelser.

GØR BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE MULIGT

Giver mulighed for at brugeren tager en uddannelse eller kommer i beskæftigelse, fordi man ikke forhindres i at navigere en mus tilstrækkeligt.

TEKNISK HJÆLP HELE VEJEN

Itremor Mouse virker til næsten alle almindelige mus, men der kan også tilkøbes en. Hvis der er specifikke behov, er TKS klar til at indgå i dialog med både kommune og brugere, med henblik på at finde frem til en løsning som kan opfylde behovet.

TILPASSER BRUGERENS BEHOV

Knappen på boksen er nem at bruge. Brugeren kan let justere på kalibreringen, udfra de aktuelle behov. Den passer derfor godt til brugere som har forskellige niveauer af tremor i løbet af dagen.

GENBRUG

Når produktet ikke længere er aktuelt for brugeren kan Itremor boksen let videregives til andre med samme behov, da den er fleksibel og nem at tilpasse til forskellige brugere.

FRA TKS TIL BRUGEREN

Denne model skal ses, som en vejledning til hvordan forløbet er, fra kontakt med TKS til produktet er hos brugeren

Bevillingsproces

Brugeren søger om at få bevilget hjælpemidlet - Her kan det være fordelagtigt at finde ud af hvilken mus brugeren bruger

01

02

Godkendt

Brugeren får bevilget produktet og det bestilles via mail til TKS

Hjælpemidlet sendes ud

Itremor Mouse sendes ud og er klar til brug

03

04

Brugertilpasning

Brugeren justerer selv på Itremor Mouses kalibreringsknap. Kan nemt justeres til ændret behov, eksempelvis hvis rystelserne forandrer sig i løbet af dagen

Teknisk assistance

Hvis der skulle være nogle specielle behov i forhold til mus eller teknisk assistance vil TKS være behjælpelig med at finde en løsning, som kan opfylde brugerens behov

05

HVAD ER INKLUDERET?

I TKS er det vigtigt for os at levere et højt serviceniveau, for at brugeren får det bedste ud af at bruge Itremor Mouse og derfor er service og hjælp selvfølgelig inkluderet i prisen.

PRODUKT OG SERVICE

- Itremor mouse boks
- USB ledning (indgang og udgang)
- Teknisk service hvis nødvendigt

TILKØB

- Mus
- Knap til ekstern højreklik
- Knap til ekstern venstreklik

HER KAN DU FINDE DET ONLINE



Facebook

<https://www.facebook.com/tkstechology/>



LinkedIn

<https://www.linkedin.com/company/tks-a-s/>

Hjælpemiddelbasen

<https://hmi-basen.dk/>



<https://www.youtube.com/watch?v=BN9JvCMXDM8>

KONTAKT OS

Søren Mørch
+45 60 68 84 68
sm@tks-technology.dk

Skalhuse 5, 9240 Nibe
www.tks-technology.dk

