

ITREMOR MOUSE

BRUGERVEJLEDNING



FUNKTIONER

- Software som filtrerer rystelser væk
- Egnede til computer mus
- Løsning til ufrivillige tryk på venstre og højre klik
- Kan nemt justeres til rystelser på mange niveauer
- Software boks sættes til mellem mus og enhed

MÅLGRUPPEN

Brugere som har udfordringer med brug af en computer mus på grund af tremor

HVEM ER TKS

"Med velfærdsteknologi, som omdrejningspunkt, er vores formål at skabe større frihed i hverdagen for borgere ramt af en invaliderende sygdom. Dette med henblik på at skabe en væsentlig forøgelse af deres livskvalitet.."

Søren Mørch, CEO



INDHOLDSFORTEGNELSE

- Introduktion, side 3
- Opsætning, side 3
- Tilpasning, side 3
- Garanti, side 3
- Hvad er inkluderet, side 4

I tremor Mouse består af et modul, som indeholder software der bortfiltrerer rystelser med musemarkøren på computeren. Derved skabes der mulighed for at tremor-ramte igen kan bruge deres computermus uden at blive forstyrret af rystelserne.

Hjælpe midlet er en boks som sættes imellem computer og computermusen via usb. Alt software er i boksen og derfor skal der kun installeres en USB driver på computeren. Boksen har to funktioner: Drejeknappen justerer i hvor høj grad softwaren filtrerer rystelser. Den anden knap slår højre- og venstreklik til og fra. Denne funktion er til dem som ukontrolleret kommer til at trykke på musens højre- og venstreklik.

INTRODUKTION

Denne manual beskriver installationen og brugen af Itremor Mouse. Venligst læs denne manual før ibrugtagningen, for at sikre korrekt installation og brug.

SETUP

Itremor boksen sættes nemt til ind imellem mus og computer via USB.

Første gang Itremor Mouse tilsluttes installeres en driver automatisk ved internet adgang. Der kan også foretages en manuel installation af driveren ved at hente fra www.tks-technology.dk/support.

TILPASNING

For at kalibrere musen til brugerens rystelser, holder brugeren sin hånd på musen og lader den ryste naturligt. Man justerer derefter på dreje knappen, indtil markøren på skærmen står stille. Boksen er nu justeret til brugerens aktuelle behov og brugeren kan navigere markøren uden større forstyrrelser.

Det er muligt at afbryde venstre/højre klik på musen ved utilsigtet tryk. Dette gøres ved at trække kontakten mod højre (Disable). Husk at tilslutte eksterne knapper for at have venstre/højre klik.

BEMÆRK: Er drejeknappen i højre bund position er modulet inaktiv, og musen er normal.

STATUS INDIKATOR (LYSDIODE)

Blinkende **grøn**: USB mus er ikke tilsluttet USB porten på Itremor Mouse.

Konstant **grøn**: USB mus er tilsluttet. Itremor Mouse er inaktiv.

Blinkende **gul**: USB mus kalibreres. Bevæg musen cirkulært i 2sec. og tryk venstre musetast.

Konstant **gul**: USB mus er tilsluttet. Itremor Mouse er aktiv.

Ny eller anden mus: Hold hjulet på musen nede indtil LED slukkes (>15sek). Ny kalibrering startes og følg LED diode indikeringen.

GARANTI

Der ydes 2 års garanti fra faktureringsdato.

Garantien dækker kun brug i forhold til manual og ingen synlige tegn på misbrug.

OPBEVARING

- Temp: 0 - 45°C
- Tryk: 80 - 110kPa
- Fugtighed: 15 - 95%

Fejl eller skade

Er der observeret fejl eller skader på produktet kontakt venligst lokal forhandler eller TKS.

Bortskaffelse

Produktet bedes afleveres ved elektronisk affald på en genbrugsstation. Smid ikke produktet ud med husholdningsaffald, da det er til skade for miljøet.

HVAD ER INKLUDERET

I TKS er det vigtigt for os at levere et højt serviceniveau, for at brugeren får det bedste ud af at bruge Itremor Mouse og derfor er service og hjælp selvfølgelig inkluderet i prisen.

PRODUKT & SERVICE

- Itremor mouse enhed
- USB ledning (indgang og udgang)
- Teknisk service support

TILKØB

- USB Mouse
- Knap til extern højre klik
- Knap til extern venstre klik

MEDIER



Facebook

<https://www.facebook.com/tkstechology/>



LinkedIn

<https://www.linkedin.com/company/tks-a-s/>

Hjælpebase

<https://hmi-basen.dk/>



<https://youtu.be/ZIZNCraVchs>

KONTAKT OS



Søren Mørch
+45 60 68 84 68
sm@tks-technology.dk

Skalhuse 5, 9240 Nibe
www.tks-technology.dk